



# Et nyt LYS på desinfektion - ISO-certificeret

En log-5 UV-C desinfektion på 25 sekunder til værktøj, udstyr, mobiler, tablets og bærbare computere for at beskytte alle



## HURTIG

Impelux™-teknologien sikrer ensartet og gentagelig desinfektion på 25 sekunder



## SIKKER

Impelux™-teknologien beskadiger ikke materialer og sikrer ingen udadgående stråling.



## LET AT BRUGE

Brugervenlig, kræver kun en stikkontakt, transportabel og derfor let integrerbar i eksisterende arbejdsgange.



## MILJØVENLIG

Ingen brug af vand, skadelige kemikalier eller væsker.



Vi er specialister i at undersøge kundens behov og i et tæt samarbejde at finde de rigtige løsninger af bedste og dokumenterede kvalitet til bakterie- og rengøringskontrol.

Vi besidder erfaring og viden sammen med et produktprogram der kan effektivisere og kvalitetssikre alle processer, så kunden undgår fejl eller produktionsstop.

# SÅDAN BRUGES UV SMART

## START AF DESINFEKTION



### STEP 1

Placer emne(er) på glaspladen - Luk låget

## UNDER DESINFEKTION



### STEP 2

Desinficer dine hænder i henhold til forskrifter




## DESINFEKTION SLUT



### STEP 3

Åben låget med ALBUEN  
Tag emne(er)



-  Hvidt lys = klar til brug
-  Grønt lys = vellykket
-  Rødt lys = mislykkes, gentag desinfektionscyklussen

## SPECIFIKATIONER:

<b>Ydre dimensioner</b>	535 x 400 x 260 mm L x B x H
<b>Indre dimensioner</b>	420 x 265 x 160 mm L x B x H
<b>dimensioner</b>	25 sekunder
<b>Desinfektionstid</b>	Alle mikroorganismer
<b>Effektivitet</b>	(bakteri-er, vira, sporer, svampe, gær) Log-5
<b>Reduktion</b>	(99,999%)

### ISO-certificering

N-EN ISO 13485:2016-04  
Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes



[www.fooddes.dk](http://www.fooddes.dk)

Tlf. +45 70 20 75 60

Kontakt os for et uforpligtende møde, hvor vi gennemgår referencer og eventuelt ser på, om vi kan hjælpe din virksomhed.